

デジタルベッドスケール (検定付)

seca 985 



▲患者にも看護スタッフにも簡単で快適な操作。ベッド移動不要でらくらく計測。250 kg まで計測可能。クリティカル機能付で体重変動監視が可能

ベッドに寝たままでグラム単位の 変化を計測

ICUをはじめ、熱傷患者病棟や透析病棟、老人介護施設などでの寝たきり患者にとってグラム単位の変化の計測は絶対不可欠です。デジタルベッドスケール seca 985 はベッドに寝たままの患者の体重測定を容易にする為の理想的な商品です。



4つの操作で簡単セッティング



1 ボタンを押したまま赤いレバーを手前に引っ張る



2 ロードセルを傾け、ベッドのタイヤの下に滑り込ませる



3 少し力を入れて、赤いレバーを下に押す



4 赤いレバーを元に戻す

患者と看護スタッフのための、最大限の快適さとシンプルで簡単な操作

寝たきりの患者の体重を seca 985 で計測する場合、まず体重計をベッドのところまで運んで来ます。4つのロードセルをそのベッドのキャスターの下に滑り込ませ、優しくキャスターを持ち上げます。そして患者をベッドに寝かせます。これにより様々なベッドがベッドスケールに早代わりします。特許を取得しているこのリフティング機能により、測定のためにベッドのキャスターや患者を必要以上に移動させる必要がありません。それが、測定時の作業負担を最小限に抑え、患者と看護スタッフに最大限の快適さを提供します。

ローリングアシスタント

4つのロードセルを収納し、ディスプレイやエレクトロニクスボックスなどを搭載しているキャスター付専用トrolleyは、移動に最適です。また、この専用トrolleyには、カルテなどの記入に便利な台もついています。

操作簡単-便利な機能

seca 985 の操作性と表示要素

seca 985 の操作性と表示要素には様々なテストを繰り返して開発、製造されたすばらしい機能があります。それらは寝たきり患者病棟での使用を最大限考慮したすべての必要条件を満たしています。また、とても衛生的で丈夫なキーボードはクリーニングも簡単に行うことができます。

充電式バッテリー付

突然の停電の時などの場合、付属の充電式バッテリーによる電源供給でその値は失われることはありません。体重管理が絶対不可欠な寝たきり患者病棟などでの突然のハプニングにも対処します。

便利な風袋引き機能

seca 985 の風袋引き機能はただ実際の患者の体重だけを差し引くのではなく、例えば患者の体重を風袋引きした後で毛布などを乗せるとその物の重量だけ表示します。逆に患者の体重を風袋引きしておくとその体重が増えたり減ったりしているのを確認することも出来ます。またボタン一つで簡単に風袋引きを解除し患者の現在における体重を表示することも出来ます。

クリティカル数値設定

人工透析において透析前、透析後、そして透析中の体重の変化を管理することは必要不可欠なことです。クリティカル数値(体重下限値)を設定することにより透析中における体重の急激な変化などでその下限の臨界値を越すとブザーが鳴り医師や看護師に臨界値を超えてしまったことを知らせます。



高精度かつ大きな最大計量

最大計量がベッドの重量も含め 500 kg、患者だけでも 250 kg と非常に大きく肥満患者なども測定可能です。また 200 kg までは 100 g 単位で、それ以上は 200 g 単位で測定可能な為、a、熱傷患者などの体重管理も正確に行うことができます。

BMI (肥満度指数)表示

seca 985 には世界保健機関の定める肥満度指数基準数値の BMI 数値をボタン一つで簡単に表示する機能が付いています。

あらゆるニーズに対応

seca 985 - 専用トロリー無しデジタルベッドスケール

病室のスペースの有効利用のために、seca 985 は専用トロリーの無いタイプもご用意いたしております。ロードセルによって感知された数値の記録の為に必要な回

路はベッド下に置けるサイズの電子ボックス内に集約されます。ディスプレイには標準付属品の壁掛金具で壁に掛けることができ、取り外しも簡単です。オプションのディスプレイスタンド seca 472 に取り付けることも可能です。

seca 435 - ベッドスケール用多機能ディスプレイ

多機能ディスプレイ seca 435 は seca 985 をより便利にするオプションディスプレイです。その特性の一つであるポーズ機能を作動させると、計測中に毛布などを乗せたり取り外したりした場合でも、患者の体重の測定値に影響を与えません。また、計測値を7つまでメモリーが可能です。



Technical data

seca 985 - 専用トロリー付デジタルベッドスケール

最大計量: 500 kg

最大患者体重: 250 kg

最小表示: 100 g < 200 kg > 200 g

電源: アダプター、充電バッテリー

精度等級: III 級

機能: 風袋引機能、ホールド機能、BMI 機能、クリティカル機能、ダンピング機能

専用トロリー(ディスプレイ付)

サイズ (WxHxD): 540 x 990 x 540 mm

重量: 25 kg

ロードセル

サイズ (WxHxD): 380 x 150 x 212 mm

重量: 6.2 kg/個

seca 985 - 専用トロリーなしデジタルベッドスケール

エレクトロニクスボックス

サイズ (WxHxD): 245 x 132 x 205 mm

重量: 2.3 kg

その他、seca985 専用トロリー付のタイプと同じ。

seca 435 - 多機能ディスプレイ

サイズ (WxHxD): 20 x 160 x 50 mm

重量: 400 g

機能: 風袋引機能、ホールド機能、上限値リミット機能、ダンピング機能、7つまでの計測値メモリー機能、ポーズ機能、RS232 インターフェイス接続機能

オプション: インターフェイスケーブル seca 451